

# Viktor - Potensring, 3 st Användarmanual

Best Friend  
moments



Erektionsstörningar är vanliga.  
Var femte man drabbas någon  
gång av det.

80% av användandet av  
intimprodukter sker i en direkt  
parsituation.

#### TIPS!

Vänd på ringen och låt  
kulan vibrera mot pungen.



#### TIPS!

Tvätta din  
Belladotprodukt med  
Cleansing gel som  
både rengör och  
återfuktar gummit.  
Då håller den längre.

#### Om Viktor

Belladot Viktor hjälper till att behålla erektionen längre. En förpackning innehåller elastiska penisringar i tre storlekar:  $\varnothing$  20, 22 och 24 mm. Materialet är mycket mjukt och töjbart, alla tre passar de flesta storlekar, men klämmer åt med varierad styrka. En finess är att de små kulorna på penisringarna även stimulerar din partner.

Viktors främsta uppgift är att hålla kvar blod i penis men även att åstadkomma en fylligare erektion. Om du har svårt att behålla erektion tillräckligt länge eller vill ha en fylligare erektion, hjälper Viktors behagligt kramande ringar dig att hålla kvar blodet i penis svällkroppar.

#### Om erektionsproblemoch potensringar

Var femte man i Sverige lider av erektionsstörningar. Det är ca 500.00 män. Ofta talar män inte om sitt problem utan lever med det, trots att det finns enkel och riskfri hjälp att få.

De flesta män drabbas av erektionsstörning någon gång i livet.

#### Hur man använder Viktor

Du kan använda en eller flera av ringarna. Du trär på ringen på den styva penis vid penisroten för att hålla kvar blodet i svällkropparna och på så sätt behålla erektionen. Om du använder flera ringar kan du placera dem på olika ställen av penis, t ex en ring direkt under ollonet och de andra två vid penisroten. Kondom kan vara bra att använda för att hålla ringarna på plats.

Riktvärdet för användande av penisringar är max 30 minuter. Blodet i penis behövs förutom till erektion, även för syresättning. Skulle du känna obehag i penis vid användandet, ska ringen/ringarna tas loss så att blodet återigen kan cirkulera fritt.

Har du svårt att få tillräckligt styv erektion kan du behöva en penispump. Den pumpar med hjälp av vakuum blod till svällkropparna i penis, så att du får erektion. Vi rekommenderar penispumpen Belladot Ingemar.

#### Om erektionsproblem

Erektionsproblem drabbar nästan alla män någon gång i livet, kanske bara under en kortare period, och försvinner då oftast av sig själv. Erektionsproblem kan även orsakas av någon sjukdom, t ex hjärt- och kärlsjukdom. Så om problemet kommit smygande och varat en längre tid (mer än ett halvår) bör du vända dig till läkare för en hälsoundersökning.

Mer info finns på [www.belladot.com/sexologensvarar/](http://www.belladot.com/sexologensvarar/)

Fråga gärna din apotekspersonal, läkare eller gynekolog för mer information, eller kontakta vår sexolog på [sexolog@belladot.com](mailto:sexolog@belladot.com).



Kontakta oss  
för ytterligare frågor:  
[info@belladot.com](mailto:info@belladot.com)  
031-653300

belladot®